


BioRoot™ RCS

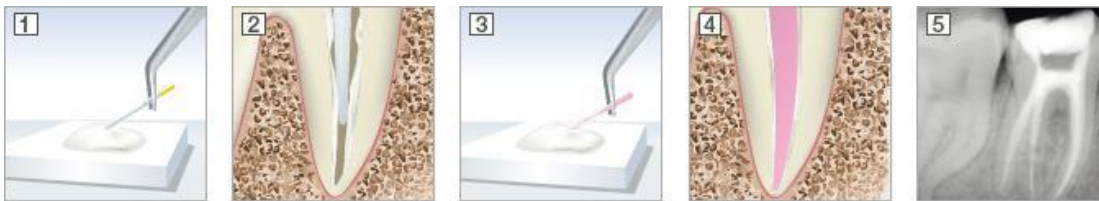

Οδηγίες ανάμιξης

Το μίγμα θα πρέπει να φτιαχτεί τη στιγμή της εφαρμογής.

1. Πάρτε τη σκόνη με το κουταλάκι της συσκευασίας. Βάλτε την ποσότητα της σκόνης ενός κουταλιού στο χαρτί ανάμιξης.
2. Πάρτε τη μονή δόση του υγρού. Γυρίστε το καπάκι για να ανοίξει. Χύστε 5 σταγόνες υγρού στο χαρτί ανάμιξης.
3. Προετοιμάστε το εμφρακτικό υλικό προσθέτοντας σταδιακά σκόνη στο υγρό. Αναμίξτε μέχρι να πάρετε μια λεία πάστα (περίπου 60 δευτερόλεπτα)
4. Αμέσως ξεπλύνετε και καθαρίστε τα εργαλεία για να απομακρυνθούν υπολείμματα υλικού.
5. Το BioRoot™ RCS έχει ελάχιστο χρόνο εργασίας τα 10 λεπτά και μέγιστο χρόνο πήξης τις 4 ώρες.

Τοποθετείστε το υλικό στο ριζικό σωλήνα

1. Καθαρίστε και διαμορφώστε το ριζικό σωλήνα σύμφωνα με τη συνήθη ενδοδοντική θεραπεία.
2. Επιλέξτε τον κατάλληλο κώνο γουταπέρκας και ελέγξτε πως ταιριάζει στο μήκος εργασίας.
3. Στεγνώστε το ριζικό σωλήνα με κώνους χάρτου.
4. Προετοιμάστε το BioRoot™ RCS σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες ανάμιξης.
5. Εφαρμόστε μια επίστρωση BioRoot™ RCS στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα χρησιμοποιώντας κώνο χάρτου ή κώνο γουταπέρκας.
6. Ολοκληρώστε την έμφραξη εισάγοντας τον κύριο κώνο της γουταπέρκας αφού προηγουμένως έχει επικαλυφθεί με BioRoot™ RCS (τεχνική του ενός κώνου) ή μερικοί επικαλυμμένοι κώνοι γουταπέρκας (τεχνική πλάγιας συμπίκνωσης)
7. Εκτιμήστε την ποιότητα της ενδοδοντικής έμφραξης ακτινογραφικά.
8. Χρησιμοποιείστε ένα ζεστό εργαλείο για να απομακρύνετε την περίσσεια της γουταπέρκας.
9. Βάλτε μια προσωρινή αποκατάσταση χρησιμοποιώντας ένα προσωρινό εμφρακτικό υλικό
10. Αν απαιτείται η τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα, θα πρέπει να μπει μετά την πλήρη πήξη του υλικού BioRoot™ RCS, μεταξύ 1 εβδομάδας και 1 μήνα.

Μια τελική ακτινογραφία θα πρέπει να βγαίνει για να επιβεβαιώνουμε τα 3-5 mm της ενδοδοντικής έμφραξης.

Απομάκρυνση του BioRoot™ RCS

Αφού το BioRoot™ RCS έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τους κώνους γουταπέρκας, αυτό μπορεί να απομακρυνθεί με τις συνήθεις τεχνικές.

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

- Επιβεβαιώστε ότι ο ελαστικός απομονωτήρας είναι σωστά τοποθετημένος, ώστε να απομονώνει το χειρουργικό πεδίο.
- Στην περίπτωση ευρύ ακρορριζικού τρήματος, ακρορριζεκτομή θα πρέπει να προηγηθεί της ενδοδοντικής θεραπείας.

Διατήρηση

Φύλαξη σε στεγνό μέρος

Η μονή δόση του υγρού θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά το άνοιγμά της. Το υπόλοιπο υγρό θα πρέπει να πετάγεται. Χρησιμοποιείτε τη σκόνη μέσα σε 6 μήνες από το άνοιγμά της.