

Θεραπεία τερηδόνας με τη διεθνή σύνθετη ρητίνη οπισθίων CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal




Dr. Nicola Scotti
Οδοντίατρος

Κατά την αποκατάσταση των οπίσθιων δοντιών με σύνθετη ρητίνη, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως τα στενά και ανατομικά σωστά σημεία επαφής και μια φυσικά διαμορφωμένη μασπτική επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη φθορά και φιλική προς τους ανταγωνιστές είναι ακόμη πιο σημαντικά από μια τέλεια αισθητική αποκατάσταση.

Γι' αυτό κάθε οδοντίατρος θα πρέπει να αποφεύγει να αφιερώνει πολύ χρόνο στην επιλογή απόχρωσης σε αυτές τις περιπτώσεις και να εστιάζει στους παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοπιστία και τη μακροζωία της αποκατάστασης. Μεγάλη υποστήριξη για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας προσφέρει το CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal, μια σύνθετη ρητίνη με μία διεθνή απόχρωση (U) για την οπίσθια περιοχή που εξαλείφει την ανάγκη λήψης και επιλογής απόχρωσης. Ταυτόχρονα, προσφέρει καλή οριακή προσαρμογή, χαμηλή τάση συρρίκνωσης και υψηλή αντοχή στη φθορά που απαιτούνται για εξαιρετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.



Εικ. 1: Αρχική κατάσταση με την ευρεία τερηδονική αλλοίωση στην άνω επιφάνεια του δεύτερου προγομφίου.

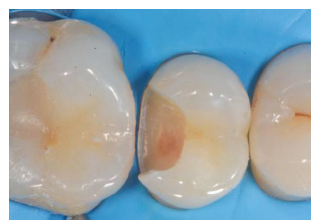

Εικ. 2: Ο προγόμφιος μετά την απομόνωση του χειρουργικού πεδίου με ελαστικό απομονωτήρα, καθαρισμός του τερηδονισμένου ιστού και παρασκευή της κοιλότητας.



Εικ. 3: Τοποθέτηση τμηματικού τεχνητού τοιχώματος και σφήνας. Και τα δύο συγκρατούνται από ένα δακτύλιο, που αυξάνει το μεσοδόντιο χώρο και έτσι εξασφαλίζει τα στενά και ανατομικά σωστά σημεία επαφής.



Εικ. 4: Σχηματισμός του άνω τοιχώματος με CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal (U απόχρωση) που ακολούθησε την επιλεκτική αδροποίηση της αδαμαντίνης με φωσφορικό οξύ (K-ETCHANT Syringe) και συγκόλληση με CLEARFIL™ SE Bond.



Εικ. 5: Ένα λεπτό στρώμα λεπτόρρευστης σύνθετης ρητίνης (CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW High) τοποθετείται στο έδαφος της κοιλότητας ως επικάλυψη ρητίνης.



Εικ. 6: Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε με CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal (U απόχρωση). Ενώ η διεθνής απόχρωση της σύνθετης ρητίνης χάνεται μέσα στον περιβάλλοντα οδοντικό ιστό, η φυσική εμφάνιση ολοκληρώνεται προσθέτοντας μια μικρή καφέ απόχρωση στις οχισμές του δοντιού.



Εικ. 7: Το αποτέλεσμα της θεραπείας αμέσως μετά την αφαίρεση του ελαστικού απομονωτήρα. Το εγγύς σημείο επαφής είναι σφιχτό και η ανατομία της μασπτικής επιφάνειας καλά διαμορφωμένη σύμφωνα με την ατομική μασπτική δυναμική του ασθενούς. Το όριο της αποκατάστασης είναι ουσιαστικά άορατο, ενώ το παρεϊακό φύμα είναι πιο ανοιχτό λόγω της αφυδάτωσης του φυσικού οδοντικού ιστού.



Εικ. 8: Το αποτέλεσμα της θεραπείας μετά από 2 μήνες.

Συμπέρασμα

Το συγκεκριμένο κλινικό περιστατικό παρουσιάζει ότι η επιλεγμένη σύνθετη ρητίνη είναι κατάλληλη για απλοποιημένες διαδικασίες αποκατάστασης στην οπίσθια περιοχή. Ο χειρισμός του υλικού είναι καλός, προσφέρει τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες με τα άλλα υλικά της σειράς CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 και συνδυάζεται αρμονικά με τις γύρω οδοντικές δομές χωρίς να είναι πολύ διαφανές. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η παραίτηση από τη διαδικασία λήψης απόχρωσης χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της θεραπείας. Ο χρόνος που εξοικονομείται σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δαπανηθεί σε λειτουργικές πτυχές – ή ακόμα και σε άλλον ασθενή.

kuraray

Noritake

INTELLIGENT SIMPLIFICATION

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL αποχρώσεις

Πόσες διαφορετικές αποχρώσεις ρητίνης χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ελκυστικές αποκαταστάσεις σε σχεδόν κάθε κλινικό περιστατικό; Εάν επιλέξετε το CLEARFIL MAJESTY™ UNIVERSAL ES-2, μόνο μερικές αποχρώσεις θα φέρουν το αποτέλεσμα. Μια CLEARFIL MAJESTY™ UNIVERSAL ES-2 είναι η λύση για όλες τις οπίσθιες αποκαταστάσεις. Στην αισθητικά πιο απαιτητική πρόσθια περιοχή υπάρχουν δύο επιλογές απόχρωσης για να διαλέξετε. Διατίθεται επιπλέον λευκή απόχρωση.



€40,50
3+1
ΔΩΡΟ



Απόχρωση για τις οπίσθιες αποκαταστάσεις



Αποχρώσεις για τις πρόσθιες αποκαταστάσεις



ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο BLOCKER (Τεχνολογία της διάχυσης του φωτός)



ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ

Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27, Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100, e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr