



UpDate!

1896 **SCHWERT**
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

120 YEARS



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

IDR

Άμεση οδοντοφατνιακή αποκατάσταση

Σύγχρονη θεραπεία · Μοντέρνα εργαλεία



1790-90

1675-06

■ ■ ■ Made in Germany

schwert.com




SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

UpDate!

Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων σε καταπονημένο φατνίο – μόσχευμα οστού συλλέγεται από το οπισθογόμφιο όγκωμα της άνω γνάθου.



Εικ. 1 Αρχική κλινική εικόνα: υπάρχει φλεγμονή στον περιβάλλοντα ιστό του αριστερού κεντρικού τομέα με κάταγμα ρίζας.

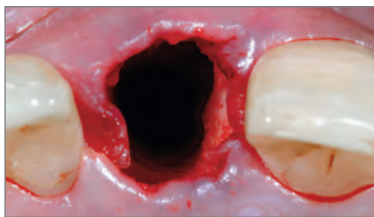

Εικ. 2 Ελάχιστη επεμβατική εξαγωγή δοντιού με περιστόμο και μινι-μοχλούς για να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική των ούλων.




Εικ. 3 Αξιολόγηση με περιοδοντική μήλη. Παρατηρείται καθολική απουσία του παρειακού οστικού τοιχώματος.



Εικ. 4 Οστετομία με υπερώια προσέγγιση.



Εικ. 5 Εισάγεται ένα εμφύτευμα Replace Select Tapered TiUnit 5x16mm (Nobel Biocare, Γκέτεμποργκ, Σουηδία). Η τελική ροπή εισαγωγής ήταν 50 Ncm.

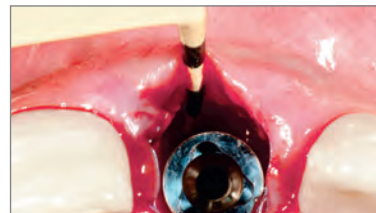




Εικ. 6 Επιβεβαίωση του εύρους του οστικού ελλείμματος.



Εικ. 7 Αξιολογείται το εύρος του οστικού ελλείμματος. Μετρώντας το εύρος του οστικού ελλείμματος σε ύψος και πλάτος.



Εικ. 8-12 Ένα οστικό μόσχευμα συλλέγεται από το παρειακό τοίχωμα της περιοχής του άνω φρονιμήτη με μια ευθεία σμίλη.

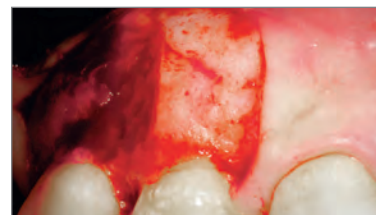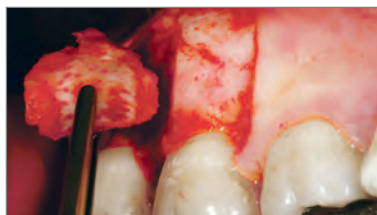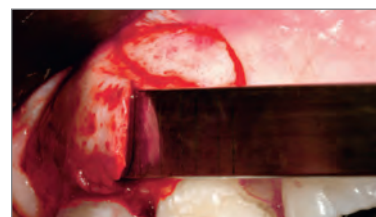



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



Εικ. 13-14 Οι οριστικές διαστάσεις του μοσχεύματος μετά τη διαμόρφωσή του, σύμφωνα με το μέγεθος του ελλείμματος και τη μορφή του.



Εικ. 15-16 Το οστικό μόσχευμα εισάγεται στο φατνίο για να αποκτηθεί μια πρόωμη σταθερότητα από την αντιστήριξη.



Εικ. 17 Μυελός οστού τοποθετείται μεταξύ του εμφυτεύματος και του οστικού μοσχεύματος. Παρατηρείστε το πάχος του νέου παρειακού φλοιώδους οστού.



Εικ. 18 Εισάγεται μια βιδωτή προσωρινή αποκατάσταση



Εικ. 19 Κλινική εικόνα 90 ημέρες αργότερα.



Εικ. 20-21 Μετά από 4 μήνες, φαίνεται η ωρίμανση του μαλακού ιστού στην αρχιτεκτονική των ούλων. Διακρίνεται ολοκάθαρα η διατήρηση του όγκου του μαλακού ιστού.



Εικ. 22 Ολοκληρώνεται η κατασκευή και τοποθετείται η στεφάνη πορσελάνης. Αισθητικό αποτέλεσμα ύστερα από έλεγχο στα 2 χρόνια της αποκατάστασης.



Εικ. 23 CBCT απεικόνιση 3 χρόνια αργότερα. Υπάρχει ικανοποιητικό πάχος οστού στην περιοχή του εμφυτεύματος.



SCHWERT
SWORD - ESPADA
EPEE - SPADA

IDR

Άμεση οδοντοφατνιακή αποκατάσταση

UpDate!

i

Το IDR Σετ σύμφωνα με τον Dr.J.C.M. Rosa

Η επιλογή της κατάλληλης σμίλης για την αφαίρεση του μοσχεύματος από το οπισθογόμφιο όγκωμα της άνω γνάθου γίνεται σύμφωνα με το σχήμα του υπάρχοντος ελθιέμματος στην περιοχή υποδοχής και τον απαιτούμενο οστικό όγκο. Τα πιο κατάλληλα σχήματα σμιλών είναι οι ευθείες και με διαμέτρους 6, 8 ή 10 mm εύρους. Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι η επιλεγόμενη σμίλη θα πρέπει να είναι 2 mm

ευρύτερη από το εύρος του μοσχεύματος που θα αφαιρεθεί.

Αυτές οι σμίλες έχουν ένα μετρημένο σε χιλιοστά ενεργό άκρο, με σκοπό να διευκολύνουν τη μέτρηση του μοσχεύματος τη στιγμή της αφαίρεσής του, επιτρέποντας την συλλογή οστικού δείγματος σε κατάλληλο μήκος και πάχος.

Εικόνα	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
	1790-90	IDR Σετ με τη θήκη SCHWERT 274x172x41 mm Αποτελείται από:	966,00 €
	1675-06	6 mm, Οστεοτόμος 18cm	90,00 €
	1675-08	8 mm, 8mm, Οστεοτόμος 18cm	90,00 €
	1675-10	10 mm, Οστεοτόμος 18cm	90,00 €
	1676-06	6 mm, Μετρητής 18cm	107,00 €
	1676-08	8 mm, Μετρητής 18cm	107,00 €
	1676-10	10 mm, Lexer-Mini Hohlmeißel / Gouge, 18 cm	107,00 €
	1697-0Ti	Βαθμομέτρηση 3/6/9/12/15/mm, διαμέτρου 1/2mm Συμπυκνωτής οστού με εναλλασσόμενα άκρα τιτανίου.	60,00 €
	2619-10	Ανοξείδωτο μπωλ	11,50 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ **José Carlos Martins da Rosa**

- Πτυχίο Οδοντιατρικής, Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Σάντα Μαρία Οδοντιατρικής Σχολής – UFSM- Σάντα Μαρία/RS, Βραζιλία 1988
- Εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία, Σαο Πάολο, Σύνδεσμος Οδοντιάτρων –APCD – Μπαουρού/SP, Βραζιλία 1991
- Εξειδίκευση και Μεταπτυχιακό στην Προσθετική, CPO SLMandic-Κέντρο Οδοντιατρικών Ερευνών Sao Leopoldo Mandic- Καμπίνας/ SP, Βραζιλία 2005.
- Διδακτορικό στην εμφυτευματολογία, CPO SLMandic-Κέντρο Οδοντιατρικών Ερευνών Sao Leopoldo Mandic- Καμπίνας/ SP, Βραζιλία.
- Συγγραφέας βιβλίου: Άμεση οδοντοφατνιακή αποκατάσταση – Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων σε καταπονημένα φατνία, από εκδόσεις Santos (Σάο Πάολο, Βραζιλία) στα Πορτογαλικά και στα Ισπανικά και από τις εκδόσεις Quintessence στα Αγγλικά.
- Ιδιωτική άσκηση επαγγέλματος, Κασίας ντο Σολ - RS, Βραζιλία.



ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΕ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Γουδή

Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, 210 7750.140 • Fax.: 210 7711.100

E-mail: info@tsaprazis.gr • www.tsaprazis.gr