


Πώς να χρησιμοποιείτε το CA37 - Cavex Impressional για να παίρνετε αλγινικά αποτυπώματα

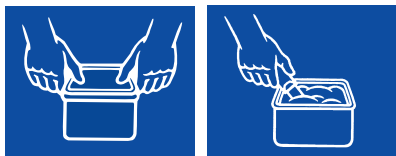

• Διατηρείστε το αλγινικό δροσερό και στεγνό, κατά προτίμηση στο ειδικό δοχείο φύλαξης αλγινικού της Cavex το οποίο κλείνει αεροστεγώς. Ανακινήστε πριν τη χρήση ή καλύτερα ανακατέψτε τη σκόνη με τη σπάθη.



• Βάλτε την ακριβή ποσότητα νερού και σκόνης αλγινικού: 1 δόση σκόνη σε 15,3 ml νερού. Χρησιμοποιείτε το δοσίμετρο της σκόνης και του νερού που διατίθενται στη συσκευασία. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε νερό σε θερμοκρασία δωματίου – για να είστε βέβαιοι για το σωστό πολυμερισμό του αλγινικού.



• Διατηρείστε το νερό στο δοχείο του δοσομετρητή σε θερμοκρασία δωματίου. Μπορείτε να επιταχύνετε τον πολυμερισμό χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και να τον επιβραδύνετε βάζοντας κρύο νερό.



• Αναμίξτε με τη σπάθη το νερό και τη σκόνη του αλγινικού, σχηματίζοντας ένα απαλό, ομοιογενές μίγμα χωρίς να βολιάσει. Για να το επιτύχετε αυτό, αρχικά προσθέστε νερό στη σκόνη καθώς ανακατεύετε το μίγμα (5-10 δευτερόλεπτα). Έπειτα ανακατέψτε το μίγμα δυνατά (15-20 δευτερόλεπτα). Στη συνέχεια χτυπίστε το μίγμα στα τοιχώματα του μπωλ ανάμιξης, απομακρύνετε όσο περισσότερο αέρα μπορείτε και ανακατέψτε το αλγινικό μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μίγμα (περίπου για 10 δευτερόλεπτα).

• Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε ένα ευλύγιστο μπωλ ανάμιξης και μια άκαμπτη σπάθη. Το ευλύγιστο μπωλ ανάμιξης διευκολύνει την εφύγραση όλης της σκόνης αλγινικού, ενώ η άκαμπτη σπάθη ασκεί την απαιτούμενη αντίσταση, ώστε να γίνει μια λεία, γρήγορη ανάμιξη.

Αν θέλετε πληροφορίες για την πλήρως αυτόματη συσκευή ανάμιξης, ζητήστε από την εταιρεία το φυλλάδιο του Cavex Algimax.




Γεμίστε το αποτυπωτικό δισκίο με το υλικό και βάλτε το στο στόμα ασκώντας ελαφρά πίεση. Αφήστε να πολυμεριστεί ενδοστοματικά για τουλάχιστον 1 λεπτό (Γρήγορη πήξη) ή 1,5 λεπτό (Κανονική πήξη).



• Έπειτα ξεπλύνετε το αποτύπωμα με κρύο νερό βρύσης. Απομακρύνετε την περίσσεια νερού (χτυπώντας το στην παλάμη σας), αλλά να μην το αφήσετε τελείως στεγνό (ποτέ να μην το στεγνώνετε).

• Ρίξτε το γύψο περίπου 15 λεπτά μετά τη πλήση του αποτυπώματος.

Φύλαξη, καθυστέρηση της παρασκευής του εκμαγείου

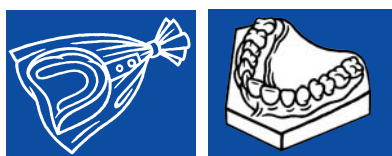

• Αν δεν μπορείτε να ρίξετε τα εκμαγεία αμέσως, φυλάξτε τα σε μια πλαστική σακούλα. Η ποσότητα του νερού που βρίσκεται πάνω στο αποτύπωμα εξασφαλίζει την απαιτούμενη 100% σχετική υγρασία. Ποτέ να μην καλύπτετε το αποτύπωμα με βρεγμένη πετσέτα γιατί μπορεί να απορροφήσει το νερό και να διογκωθεί.

• Ρίξτε το γύψο μέσα σε 48 ώρες από τη λήψη του αποτυπώματος. Πριν ρίξετε το γύψο, βρέξτε το αποτύπωμα με τρεχούμενο νερό για λίγο και απομακρύνετε πάλι τις περίσσειες.

• Ένα αποτύπωμα με Cavex CA37 ή Impressional μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή εκμαγείου δύο φορές. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να φυλαχθεί όπως έχει ήδη περιγραφεί.

Απολύμανση – αποτελεσματική και κλινικά αποδεκτή



Για να παρεμποδίσετε τις μολύνσεις στην οδοντιατρική πράξη και στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, προτείνεται η εμβάπτιση των αποτυπωμάτων αλγινικού στο ImpreSafe 3 λεπτά.

Η διαδικασία:

• Ξεπλύνετε το αποτύπωμα προσεκτικά με τρεχούμενο νερό.

• Βάλτε ολόκληρο το αποτύπωμα και το αποτυπωτικό δισκίο (περιλαμβάνοντας τη λαβή του) στο απολυμαντικό διάλυμα για 3 λεπτά.

• Ξεπλύνετε πάλι το αποτύπωμα προσεκτικά με τρεχούμενο νερό. Απομακρύνετε το επιπλέον νερό (χτυπώντας το στην παλάμη σας), αλλά αφήστε κάποια υγρασία στην επιφάνεια.