

Cavex Cream Alginate (2025 Product Award)



Έλαβε κλινική αξιολόγηση 97%

Περιγραφή

Το **Cavex Cream Alginate** είναι ένα αλγινικό αποτυπωτικό υλικό χωρίς σκόνη, σχεδιασμένο να αναμιγνύεται εύκολα σε μια λεία, κρεμώδη σύσταση. Προσφέρει υψηλή αντοχή στην απόσχιση, ελαστικότητα και ακρίβεια λεπτομέρειας στα 5 μικρά. Επιπλέον, αυτό το αποτυπωτικό υλικό έχει ευχάριστη οσμή και χρώμα. Το Cavex Cream Alginate είναι διαθέσιμο ως κανονικής και γρήγορης πήξης. Η γρήγορη πήξη έχει χρόνο ανάμειξης 20 δευτερολέπτων και συνολικό χρόνο εργασίας 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, ο οποίος περιλαμβάνει χρόνο ενδοστοματικής πήξης 1 λεπτού. Η κανονική πήξη έχει χρόνο ανάμειξης 30 δευτερολέπτων και συνολικό χρόνο εργασίας 3,5 λεπτά, ο οποίος περιλαμβάνει 1,5 λεπτό για ενδοστοματική πήξη. Το αποτύπωμα μπορεί να σαρωθεί για ψηφιοποίηση. Το Cavex Cream Alginate συσκευάζεται σε σακουλάκια των 500 g. Διατίθενται κουτάλι σκόνης και μεζούρα νερού.

Ένδειξη

- Όλες οι κλινικές διαδικασίες όπου απαιτείται αλγινικό αποτύπωμα.

Μοναδικό χαρακτηριστικό

- Ακριβής λεπτομερής αποτύπωση στα 5 μικρά.

Κλινικές συμβουλές

- Ακολουθήστε τις οδηγίες και αφήστε τον ασθενή να ξεπλύνει πρώτα – διευκολύνει την αφαίρεση του αποτυπώματος.
- Χρησιμοποιήστε πολύ κρύο νερό και ανακατέψτε καλά. Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του νερού ταιριάζει με τη μεσούρα για να εξασφαλίσετε τη σωστή σύσταση.
- Εφαρμόστε ελαφρά αέρα γύρω από τα δόντια - αφήστε τα ελαφρώς υγρά για να αποφύγετε τις φυσαλίδες στο όριο.
- Η ακαμψία του υλικού βοηθά στα αποτυπώματα για οδοντοστοιχίες.


Βασικά σημεία αξιολόγησης

Το Cavex Cream Alginate (ταχείας πήξης) αξιολογήθηκε από 29 συμβούλους για συνολικά 432 φορές.

- Εύκολο στη χρήση.
- Γρήγορη πήξη.
- Ανθεκτικό στην απόσχιση.
- Καλή σύσταση.
- Ευχάριστη οσμή και γεύση.
- Ακριβείς, λεπτομερείς αποτυπώματα.


Cavex Cream Alginate

Key Features:

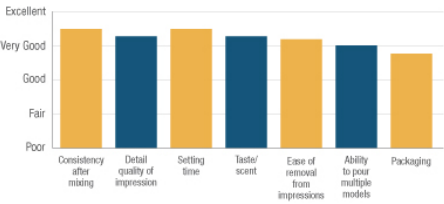

Cavex Cream Alginate

Compared to Competitive Products:

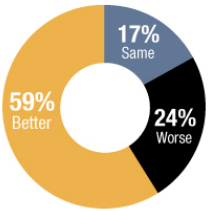

Cavex Cream Alginate

Percentage of Consultants Who Would:

