

Composi-Tight 3D Fusion Sectional Matrix System (2025 Product Award)



Έλαβε κλινική αξιολόγηση 97%

Το Composi-Tight 3D Fusion αποτελεί τη νέα γενιά του Τμηματικού Τεχνητού Τοιχώματος, σχεδιασμένο να επιτρέπει τη δημιουργία στενών επαφών στις οπίσθιες αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης. Οι ισχυροί δακτύλιοι βελτιώνουν τη συγκράτηση και προσαρμόζονται στο δόντι, ενώ οι προεκτάσεις συγκράτησης συγκρατούν το δακτύλιο στο δόντι για να εμποδίσουν την μετακίνησή του και τα άκρα σιλικόνης που ελαχιστοποιούν και αποτρέπουν τη διαφυγή του.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

- Προεκτάσεις συγκράτησης στο δακτύλιο για να εμποδίζει τη διαφυγή του.
- Διαθέσιμος ευρύς δακτύλιος για εκτεταμένες αποκαταστάσεις
- Επικαλυμμένα και μαρκαρισμένα τεχνητά τοιχώματα
- Διεθνής αρπαγοφόρος

Ένδειξη

- Σε αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης Ομάδος II.

Κλινικές Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι το τεχνητό τοίχωμα είναι στο ίδιο επίπεδο με το μασητικό επίπεδο – σφηνώστε καλά για λιγότερη αντανάκλαση.
- Βεβαιωθείτε ότι το τεχνητό τοίχωμα είναι κεντραρισμένο στο σημείο επαφής πριν τοποθετήσετε τη σφήνα και το δακτύλιο.
- Αφιερώστε χρόνο για να τοποθετήσετε προσεκτικά το δακτύλιο πάνω από τα δόντια, έτσι ώστε να έχετε την ιδανική προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος στις παρειακές και γλωσσικές επιφάνειες των δοντιών.
- Τοποθετήστε τη σφήνα αφού είναι ενεργοποιημένος ο δακτύλιος.

Κύρια σημεία αξιολόγησης

Το Composi-Tight 3D Fusion αξιολογήθηκε από 23 αξιολογητές, σε συνολικά 605 χρήσεις.

- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση.
- Άριστες μεσοδόντιες επαφές και περιγράμματα δοντιών.
- Περιλαμβάνει ευρείς δακτυλίους και δακτυλίους με υποουλικές επεκτάσεις.
- Εξαιρετική συγκράτηση.
- Ασφαλής τοποθέτηση των σφηνών.

