

PANAVIA™ SA Cement Universal (2025 Product Award)



Έλαβε κλινική αξιολόγηση 98%

Περιγραφή


Η **PANAVIA SA Cement Universal** είναι μια αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδη κονία, η οποία:

- Προσκολλάται σχεδόν σε κάθε υλικό, συμπεριλαμβανομένων των υαλοκεραμικών, χωρίς να χρειάζεται διαφορετικό ενεργοποιητή συγκόλλησης.
- Χρησιμοποιεί ένα μοναδικό παράγοντα σιλιανοποίησης ενσωματωμένο στην πάστα – LCSi μονομερές– κάνοντας την κονία να παρέχει έναν ισχυρό, ανθεκτικό χημικό δεσμό με πορσελάνη, διπυριτικό λίθιο και σύνθετη ρητίνη.
- Περιέχει το αυθεντικό MDP μονομερές στην πάστα που επιτρέπει τη χημική συγκόλληση με ζirkονία, οδοντίνη, αδαμαντίνη και κράματα μετάλλων.

Ενδείξεις


Συγκόλληση:

- Στεφανών/γεφυρών
- Ενθέτων/Επενθέτων
- Συγκολλούμενες γέφυρες τύπου Maryland
- Ακινητοποιήσεις
- Άξονες
- Προσθετική επί των κολοβομάτων των εμφυτευμάτων

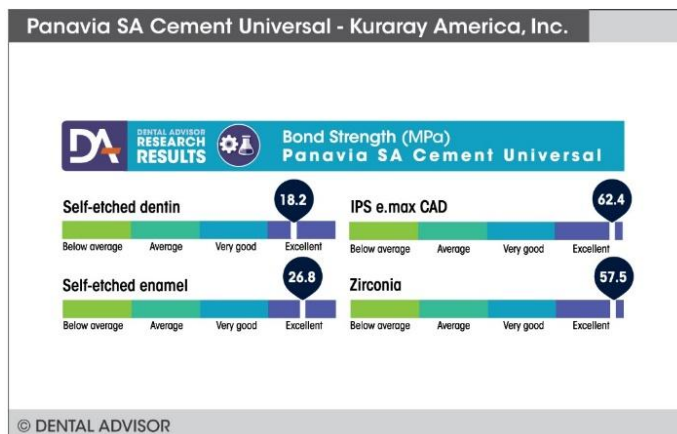

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

- Προσκολλάται σχεδόν σε όλα τα υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένου του Διπυριτικού Λιθίου
- Διαδικασία του ενός σταδίου
- Εύκολη, φιλική προς τα ούλα αφαίρεση της περίσσειας της κονίας
- Δεν χρειάζονται διαφορετικούς ενεργοποιητές συγκόλλησης
- Μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου

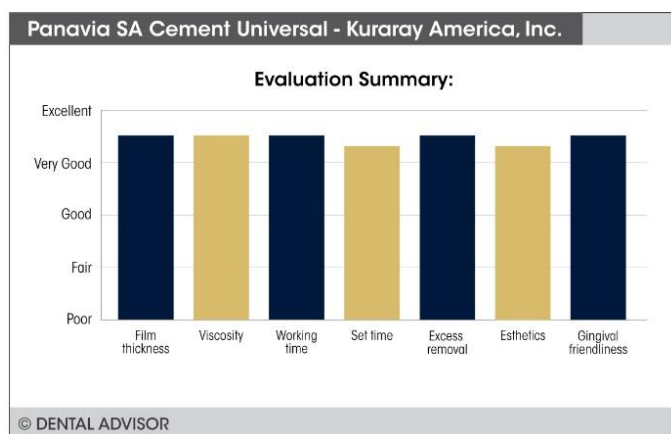

Κλινικές Συμβουλές

- Τοποθετήστε την αναμεμειγμένη κονία στη στεφάνη και εφαρμόστε το άκρο ανάμειξης κατά μήκος των ορίων της αποκατάστασης για να εξασφαλίσετε ικανοποιητική ποσότητα κονίας στα όρια. Τοποθετήστε τη στεφάνη και βάλτε νήμα ανάμεσα στα σημεία επαφής. Φωτοπολυμερίστε παρειακά και γλωσσικά και μετρήστε μέχρι το πέντε, τραβήξτε το νήμα και χρησιμοποιήστε έναν ανιχνευτήρα για να αφαιρέσετε την περίσσεια της κονίας. Συνεχίστε τον φωτοπολυμερισμό.
- Πρέπει να καθαρίσετε την περίσσεια της κονίας στον προτεινόμενο χρόνο, καθώς είναι δύσκολο να καθαριστεί αν παραμείνει για πολύ ώρα.