



Έλαβε κλινική αξιολόγηση 96%

Περιγραφή


Το **Panavia Veneer LC** είναι μια φωτοπολυμεριζόμενη, αισθητική ρητινώδης κονία που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όψεων, ενθέτων και επενθέτων πάχους μικρότερου από 2 mm. Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις, διαφανές, διεθνές, καφέ, λευκό και απαλό λευκό με αντίστοιχες πάστες δοκιμής.

Ενδείξεις

Χρησιμοποιείται για συγκόλληση Έμμεσων Αποκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενθέτων/επενθέτων και των όψεων πάχους μικρότερου των 2 mm.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

- Οι σφαιρικές ενισχυτικές ουσίες παρέχουν καλό ιξώδες και ρευστότητα
- Τα νανοσυμπλέγματα παρέχουν καλό χειρισμό χωρίς «σκληρή» σύσταση
- Οι ενισχυτικές ουσίες προσφέρονται για καλύτερη αντοχή και λιγότερες χρωστικές με την πάροδο του χρόνου
- Σε 1 δευτερόλεπτο γίνεται πολυμερισμός επαφής και ακολουθεί ο φωτοπολυμερισμός

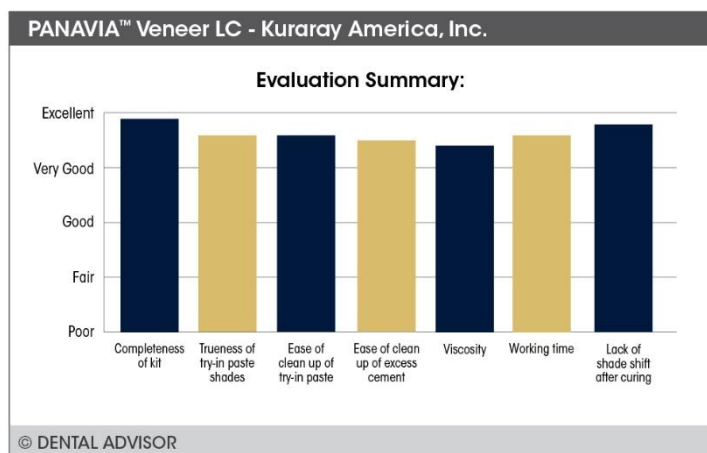

Κλινικές Συμβουλές

- Η κονία καθαρίζεται καλά, αλλά αν υπάρχουν υπολείμματα κονίας μετά την πλήρη σκλήρυνση μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθούν. Αυτό λέει επίσης για το πόσο ισχυρή είναι η κονία.
- Χρησιμοποιήστε μια μικροβούρτσα ή ελαστικά για να καθαρίσετε την περίσσεια της κονίας πριν τη σκλήρυνση.
- Εφαρμόστε γέλη γλυκερίνης στα όρια μετά την τοποθέτηση της όψης με την κονία για να εξαλειφθεί η στιβάδα αναστολής του οξυγόνου και να διασφαλιστεί ο πλήρης πολυμερισμός πριν από τον φωτοπολυμερισμό μέσω της γέλης.
- Προτιμάται ο υγρός καθαρισμός, καθώς ο πολυμερισμός είναι πολύ σταθερός.